

La cinta profiláctica es fundamental en procedimientos de profilaxis dental por tener fácil acceso al área de la región proximal, donde su cara activa actúa de manera efectiva en la remoción de cálculos dentales. Las microláminas circulares, ubicadas alrededor de los agujeros en una de las caras de la cinta, tienen como principal característica es su acción contra los cálculos, preservando, sin embargo, la integridad del esmalte y de los materiales restauradores.

Indicaciones: La Cinta Profiláctica es indicada para uso clínico en la remoción de placa bacteriana y tártaro.

Uso: Introducir la cinta en el espacio interproximal observando que la cara activa esté frente hacia el proximal deseado. Sostener la cinta por las extremidades, presionar contra el diente y realizar movimientos de vaivén hasta obtenerse el efecto deseado. Al terminar el procedimiento retirar la cinta.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. En caso de alergia

comprobada del paciente a cualquiera de los componentes de este producto, el mismo no deberá ser utilizado. El contacto de la cinta con la encía puede causar heridas al paciente. Es recomendable la protección de la papila. La reutilización puede afectar el desempeño del producto. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Dimensiones: 100mm x 4mm.

Composición: Acero inoxidable.

Almacenamiento: Almacenar en local seco, fresco y al abrigo de la luz solar

Eliminación: Deseche de acuerdo con los requisitos locales aplicables.

Ref.	Código	Conteúdo
0.3076	0009010104	10 cintas de 100mm x 4mm

Resp. Téc: Gisele K. Gruber
CREA/SC 179557-7



Dispositivo
Médico



BPF
Boas Práticas
de Fabricação

EC REP Obelis S.A

Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: + (32) 2.732.59.54
E-mail: mail@obelis.net

Manufacturer: TDV Dental Ltda.
CNPJ 81.591.786/0001-60
XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000
Pomerode/SC - Brasil
Reg. ANVISA 10291220068
☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020
info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

Versão 09 - 02/2023